

Tubos de Sangre

Avian Biotech ofrece tubos para colectar, transportar, y **examinar** la sangre para determinar el sexo y enfermedades en los pajaros. Los tubos de sangre nos permiten examinar su pajaro para enfermedades tales como PBFD y bacterias como Chlamydia. Ademas, los tubos de sangre pueden ser usados para identificar el sexo del pajaro.

Precauciones a tomar cuando se colectan las muestras:

- Lavarse las manos, las tijeras, etc., en medio de cada pajaro. Si es posible, tratar de no tocar el final del "**capillary tip**". Para mas informacion sobre la contaminacion, favor de visitar nuestra seccion de contaminación en nuestra pagina del internet.
1. Escriba claramente en letra de molde la especie del pajaro y tambien la identificación. La identificación del pajaro puede ser el numero de la banda o microchip, el nombre del pajaro, o el numero de la jaula. Esto es importante para saber cual muestra va con cual pajaro.
 2. Una vez que tengas al pajaro bajo control, usa un corta unas limpios para cortar la una del dedo a una distancia de 2/3 de donde sobresale la una. Llene el "**capillary tip**" con sangre y pongalo en el tubo. Cierre la tapa fuertemente y batalo suavemente para mezclar la sangre con el bufer.
 3. Este seguro que el pajaro ha parado de sangrar antes de devolverlo a su jaula. Para parar la sangre, aplique un coagulante como Kwik Stop con un aplicador a la una cortada.
 4. Escriba en letra de molde y legible la información cuando llene la copia blanca de la planilla. So no tiene una planilla, favor de visitar nuestra pagina del internet y en el menú escoja "download page".
 5. Envie las tarjetas por correo junto con la copia blanca de la planilla y el pago a la direccion al final de la pagina. Si desea recibir su respuesta lo mas pronto posible, favor de enviar su muestra Overnight o Two day mail. Usualmente, nosotros le enviamos los resultados 48 horas después de haber recibido su muestra.

• Envie las tarjetas a la siguiente direccion:
Avian Biotech International
1336 Timberlane Road
Tallahassee, FL 32312-1766